

Caso Clínico - Estética em dentes anteriores permanentes jovens

Autores: Prof. Dr. Francisco Xavier Paranhos Coêlho Simões

Especialista em Odontopediatria APCD-Bauru(SP), Especialista em Ortodontia e Ortopedia dos Maxilares, Mestre pela FOUFBA. Doutor em Odontopediatria pela FOUSP, Professor da UESB, UNIME e FBDC.

Marcus Vinícius B Araújo e Camila Chagas Vila-Flor Santos

Alunos do 9º semestre de graduação da UNIME

O paciente compareceu ao ambulatório da faculdade com queixa de alteração da estética nos dentes anteriores (fig. 01) que comprometia o convívio social.

Inicialmente, foi feita a anamnese para obter informações sobre a causa de alteração estrutural de esmalte. O responsável pelo paciente relatou história de trauma aos 3 anos de idade. Após a esfoliação das unidades 5.1 e 6.1, observou-se a irrupção das unidades sucessoras com aspectos amarelado e defeito estrutural no terço incisal.

O uso de resina Opallis odontopediatria neste caso possibilitou uma estética mais agradável. A resina foi inserida de forma incremental utilizando uma fina camada de OP para disfarçar a coloração escura da dentina, na segunda camada a resina DA1 e última camada de A0,5. Acabamento realizado na segunda sessão com discos de diferentes granulações (FGM).



Figura 01. Aspecto inicial



Figura 02. Close das unidades 1.1 e 2.1



Figura 03. Realização de bisel



Figura 04. Condicionamento ácido



Figura 05. Aplicação do adesivo



Figura 06. Aplicação da resina Opallis OP



Figura 07. Aplicação da resina Opallis DA1



Figura 08. Aplicação da resina A0,5



Figura 09. Aspecto imediato



Figura 10. Acabamento (24 horas após)



Figura 11. Aspecto final