

## **Caso Clínico – White Class com Cálcio**

---

O produto utilizado foi White Class com cálcio 6%. Foi realizada a moldagem com alginato de ambas as arcadas e após a confecção das moldeiras individuais optamos por iniciar o clareamento na arcada superior. Dessa forma o paciente consegue visualizar a diferença entre os arcos e conseqüentemente a eficácia do gel.



Caso inicial.



Três dias após o clareamento do arco superior, com uso do gel por 1h e meia por dia, a paciente apresenta um contraste significativo entre os arcos, mostrando elevada eficácia de White Class com Cálcio.



Resultado final de clareamento, após duas semanas de utilização do produto. Observe o excelente resultado conquistado.

Antes



Depois

